

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ TGR-R RS 881



MODRÁ (BL)



STŘÍBRNÁ (SL)



POUŽITÍ

Chodítka tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné rovněž k transportu drobných předmětů.

ÚVOD

Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy (viditelné a hmatatelné poškození, např. praskliny). Pokud tomu tak je, kontaktujte prosím prodejní místo. Poškozený výrobek nepoužívejte! Upozorňujeme, že při používání poškozeného výrobku může dojít k úrazu!

Důležité je, abyste si přečetli tuto příručku, která obsahuje důležité informace.

Máte-li dotazy ohledně používání výrobku, kontaktujte nás.


Rádi bychom také zdůraznili, že pokud si nejste jistí o vhodnosti používání této pomůcky vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

POPIS

Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených lakovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, a doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici, a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi.

Chodítko je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace, sedátkem, jídelním táckem a košíkem.

- a. rukojeť
- b. brzda
- c. aretační šroub
- d. aretace skládání rámu
- e. příčný záves
- f. sedátko
- g. držák berle
- h. horní regulace brzdy
- i. spodní regulace brzdy

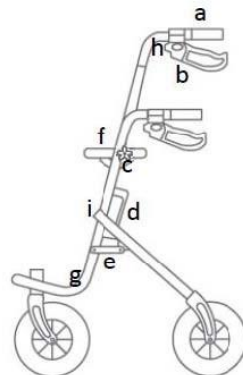

MONTÁŽ

Rozložení a složení chodítka

Rám chodítka vyjměte z krabice a rozložte stlačením příčného závěsu. Přiložená madla vložte do otvorů v rámu, nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici zafixujte pomocí aretačních šroubů a matice s umělohmotnou páčkou, které vsunete do otvorů v rámu. Lanka brzd by měla být zepředu. Zavěste košík na přední část pod sedátko. Táč můžete nasadit na sedátko tak, aby spodní výstupky zapadly do otvorů v sedátku.

Pro složení chodítka odblokujte brzdu silným zatáhnutím páčky brzdy směrem dolů. Stlačte aretační pojistku pro skládání rámu, která se nachází na pravé straně, a současně zatáhněte směrem nahoru příčný záves. Můžete sundat košík a táč.

Upozornění: Buďte opatrní při skládání chodítka, aby nedošlo k přiskřípnutí prstů v závěsech!

Použití brzd

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd.

Pro zabrzdění chodítka stlačte páky brzd nahoru směrem k rukojeti. Silným stlačením páky brzdy směrem dolů, se brzdy zablokuji a zůstanou zabrzděné. Tento způsob zabrzdění používejte při postoji a při používání chodítka k sezení. Stlačením páky směrem nahoru brzdy odblokujete.

Upozornění: Vždy používejte obě brzdy najednou!

Nastavení výšky rukojeti

Rukojeti nastavte v takové výšce, aby uživatel chodítka stál na tolik ve vzpřímené poloze, na kolik mu to dovolí zdravotní stav, se svěšenými rameny, ruce lehce prohnuté v loktech. Nemělo by se opírat o chodítko celou váhou těla.

Výšku nastavte povolením aretačních šroubů, nastavením požadované výšky a opětovným dotažením aretačních šroubů.

Upozornění: Obě rukojeti nastavte na stejnou výšku!

Regulace brzd

Upozornění: Před prvním použitím zkontrolujte stav seřízení brzd!

Brzdy jsou seřizené ve výrobě. Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění



se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.

Horní regulace brzd

Spodní regulace brzd

Vrchní regulace brzdy – povolte připojení lanka, zatáhněte lanko na požadovanou vzdálenost a dotáhněte kontramatku.

Spodní regulace brzdy – povolte klíčem upevňovací šroub. Držte brzdu a zároveň zatáhněte za černé lanko brzdy tak, aby jste zajistili napnutí lanka. Dotáhněte upevňovací šroub a zkontrolujte účinek brzd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková šířka: 57 cm

Celková hloubka: 65 cm

Rozměry sedáku: 38 x 16 cm

Výška sedáku od podlahy: 60 cm

Výška rukojeti od podlahy: 75-98 cm

Rozměr kol: 20 cm (8")

Hmotnost: 10,8 kg

Nosnost: 135 kg

Nosnost košíku: 12 kg

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Chodítko smí používat pouze jedna osoba zároveň.
- Sedátko slouží pouze k dočasnému odpočinku.
- Před použitím sedátka je nutno zaaretovat brzdy.
- Není dovoleno používat sedátko k transportu.
- Při požití sedátko se není možné zaklánět. Může dojít k úrazu.
- Není dovoleno stoupat na chodítko.
- Táček a košík slouží k přepravě lehkých předmětů. Není dovoleno převážet ostré předměty a horké nápoje.
- Nepřekračujte maximální zatížení (135 kg).
- Chodítko je určeno pro použití na rovném povrchu s max. sklonem 5%
- Není dovoleno požívat chodítko na mokřem, kluzkém anebo písčitém povrchu.
- Pro zachování bezpečnosti se doporučuje odstranit v bytě možné překážky, vysoké koberce, prahy, kluzké povrchy musí být chráněny, např. protiskluzovou rohoží.

- Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi po nerovném chodníku a při zdolávání obručnicků. S chodítkem necouvejte.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy konstrukce. Veškeré opravy musí být provedeny kvalifikovaným servisem či výrobcem.
- Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků.
- Pro zachování dlouhé životnosti a vlastností produktu je nutné udržovat produkt v čistotě a dodržovat skladovací podmínky. Neskladujte při minusových teplotách, velmi vysoké vlhkosti (koupelny) a ve venkovních prostorech.

Upozornění: Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody či úrazy způsobené použitím výrobků v rozporu s touto instrukcí a účelem použití.

ÚDRŽBA

Nejméně jednou za 3 měsíce je nutno provést vizuální kontrolu všech jisticích částí výrobku. Současně provést kontrolu:

- Brzd
- Spojovacích součástí (šrouby, závěsy)
- Regulace nastavení výšky madel
- Stability a vzhledu rámu (praskliny apod.)

Rám chodítka je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem a následně důkladně osušit. Není dovoleno používat abrazivní čisticí prostředky, způsobující mechanické narušení povrchu. Průběžně odstraňujte nečistoty z pohyblivých částí chodítka (kola, závěsy).

ZÁRUKA A SERVIS

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

Důležité upozornění: Firma Distrimed s.r.o., výhradní distributor výrobků značky Timago do ČR prohlašuje, že námi distribuované výrobky splňují veškeré normy platné v České republice. Tyto výrobky, určené pro ČR, se dají identifikovat dle výrobního čísla na výrobku, a jsou dodávány s návodem k použití, na kterém je uveden jako distributor firma Distrimed s.r.o. Výrobky, které byly do ČR dovezené jinou cestou, nemusí splňovat veškeré normy platné v ČR, a firma Distrimed s.r.o. nebude poskytovat na tyto výrobky záruční ani pozáruční servis.

Symbols

	Referenční číslo		Výrobce
	Sériové číslo		Datum výroby
	Číslo skupiny		Zástupce v Evropské Unii
	Poznámka		Prosím přečtěte si návod
	Označení, že výrobce provedl posouzení shody výrobku v souladu s požadavky směrnice EU pro zdravotnické prostředky.		

Datum poslední revize návodu: 15.12.2017

Výrobce: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko
 Výhradní distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín,
 tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz, www.distrimed.cz