

# VEVOR

**Dostupné. Spolehlivé. Pro lepší domov.**



**CENTRUM PODPORY VEVOR**



## ÚVOD

Toto je originální návod k použití. Před uvedením výrobku do provozu si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v tomto návodu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na závazný výklad tohoto návodu k použití. Vzhled výrobku se může lišit od výrobku, který jste obdrželi. O případných technologických nebo softwarových aktualizacích výrobku vás nemusíme znovu informovat.



Madlo k posteli – LQX-110051

VAROVÁNÍ ? Pro snížení rizika zranění si uživatel musí pečlivě přečíst návod k použití.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržení může vést k vážnému zranění.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

#### ABY NEDOŠLO K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ V DŮSLEDKU PŘEVŘÁCENÍ:

1. Na tomto výrobku NESMÍTE sedět ani stát.
2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem nebo v jeho blízkosti hrály. Malé náhradní díly uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
4. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Nepoužívejte jej, pokud jsou některé části uvolněné nebo poškozené.
5. Uchovávejte mimo dosah ostrých hrotů, čepelí a dalších předmětů, které by mohly výrobek poškrábat.

## NÁVOD K POUŽITÍ



### POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO MADLA K POSTELI

Toto madlo k posteli je pomůcka pro udržení rovnováhy. Je určeno pro osoby, které jsou pohyblivé, ale potřebují určitou pomoc při vstávání z postele, ulehání nebo bezpečné změně polohy na lůžku. Madlo NENÍ určeno pro osoby s velmi omezenou pohyblivostí ani pro osoby trvale upoutané na lůžko. NENÍ určeno k zabránění pádu osoby z postele.

### UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

1. Pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit zranění.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny části bezpečně smontovány a že všechny pružinové pojistky správně zapadly na své místo.
3. Prostor mezi pomocným madlem a matrací představuje riziko vážného, život ohrožujícího zachycení. Hlava, krk, paže, nohy nebo tělo osoby se mohou zaklínit mezi bokem matrace a madlem.
4. Matrace musí po celou dobu těsně přiléhat k madlu bez jakýchkoli mezer. Toto je nutné často kontrolovat, nejméně jednou denně.
5. Matrace musí po celou dobu těsně přiléhat k madlu bez jakýchkoli mezer. Toto je nutné často kontrolovat, nejméně jednou denně.
6. Výrobek NIKDY nepoužívejte, pokud těsně nepřiléhá k matraci bez mezer a pokud není nejméně 12,5 palce (31,8 cm) od čela a nohou postele.
7. Výrobek NIKDY nepoužívejte v přítomnosti dětí.
8. Výrobek NIKDY nepoužívejte na postelích pro malé děti, patrových postelích, vodních nebo nafukovacích postelích, postelích s měkkými stlačitelnými podložkami ani na polohovatelných postelích. Nepoužívejte jej také na postelích s matrací vyšší než 13 palců (33 cm) nebo nižší než 7 palců (17,8 cm). Používejte POUZE s jednolůžky a postelemi velikosti queen a king.
9. Výrobek je pomocná pomůcka. Pacienti, kteří se nedokážou samostatně pohybovat, musí být pod dohledem.

### 1. Otevřete balení a zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny níže uvedené části výrobku

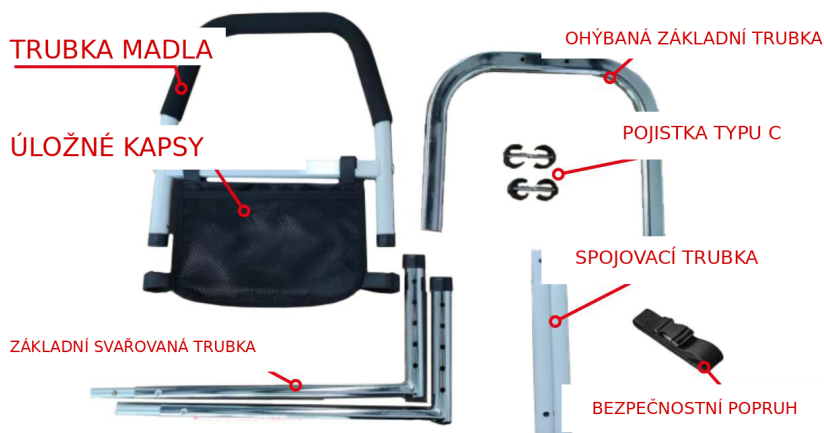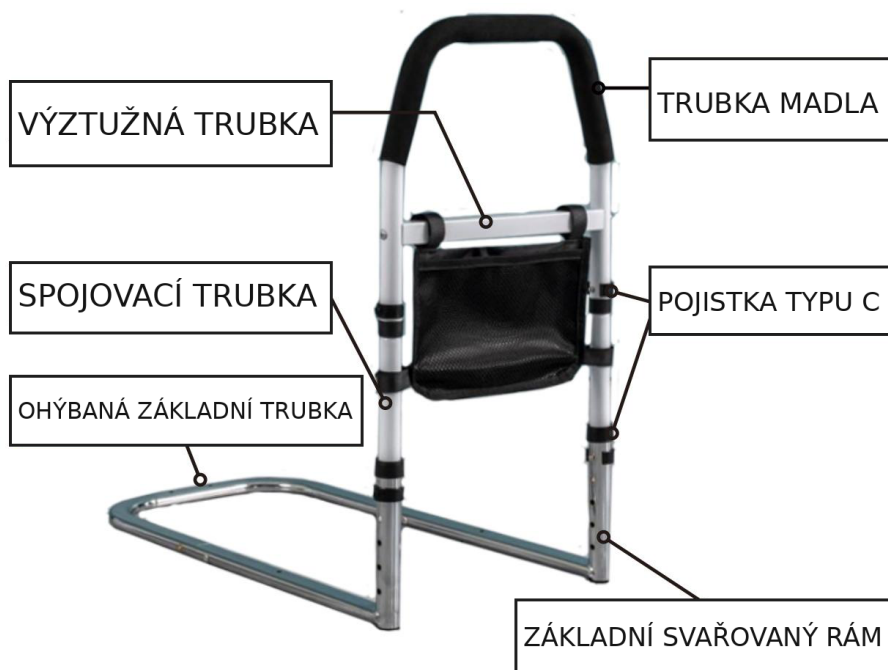

### 2. Sestavení základního rámu

Vyjměte základní svařovaný rám. Vložte ohýbanou základní trubku do základního svařovaného rámu. Poté vložte trubku madla a spojovací trubku do základního svařovaného rámu. Zarovnejte obě trubky s otvory a vložte pojistky typu C. Viz obrázek níže.



### Nastavení výšky madla


Vyjměte pojistky typu C a nastavte trubku madla do požadované výšky. Poté pojistky znovu správně zajistěte.



Rozměry základny: 610 × 320 mm ? Nastavení výšky: 535?635 mm

### VOLITELNÉ - Připevnění bezpečnostního popruhu k rámu postele

Bezpečnostní popruh je volitelný a jeho použití není povinné. Sejměte matraci z postele. Umístěte sestavené madlo na požadované místo na posteli. Obtočte popruh kolem základny madla v poloze znázorněné v kroku ①. Vedte popruh přes horní část postele a zpět pod základnu. Spojte obě přezky popruhu podle kroku ②. Zatáhněte za volný konec popruhu a utáhněte je.

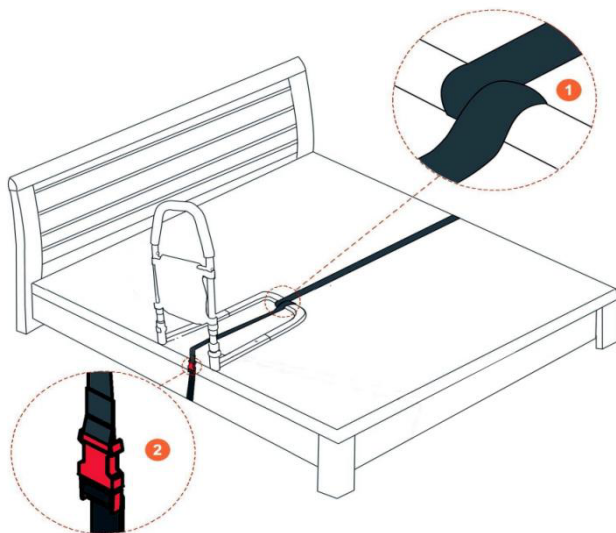

### VOLITELNÉ - Připevnění madla k rámu postele

Madlo k posteli lze pomocí dodaných šroubů upevnit k základně postele a zvýšit tak stabilitu. Toto upevnění však není nutné.

### ČIŠTĚNÍ MADLA K POSTELI

Před použitím ověřte vhodnost čistícího prostředku. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky ani abrazivní utěrky, protože by mohly trvale poškodit povrch a zneplatnit záruku.

1. Pravidelně čistěte mýdlovou vodou nebo teplou vodou. Poté výrobek otřete suchým ručníkem.
2. Před použitím nebo uložením nechte výrobek zcela vyschnout.

### NEKOMPATIBILNÍ TYPY POSTELÍ

Výrobek nepoužívejte na postelích pro malé děti, patrových postelích, vodních nebo nafukovacích postelích, postelích s měkkými stlačitelnými podložkami ani na polohovatelných postelích. Nepoužívejte jej na postelích s matrací vyšší než 33 cm nebo nižší než 17,8 cm. Používejte pouze s jednolůžky a postelemi velikosti queen a king.

### NÁŠ POPRODEJNÍ SERVIS

1. Pokud zjistíte poškození výrobku nebo chybějící části, kontaktujte náš zákaznický servis.
2. Náš zákaznický servis je k dispozici pro zodpovězení vašich dotazů nebo řešení problémů týkajících se výrobku.
3. Usilujeme o rychlou a efektivní podporu, abychom zajistili spokojenost zákazníků.
4. V případě dotazů, záručních nároků nebo potřeby pomoci kontaktujte náš zákaznický servis.

### POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MADLA K POSTELI

1. Před použitím se ujistěte, že je madlo správně namontováno a bezpečně připevněno k rámu postele.
2. Při nastavování výšky nebo polohy madla se před použitím ujistěte, že je bezpečně zajištěno na místě.
3. Nedovolte dětem, aby si s madlem hrály nebo se na něj zavěšovaly. Výrobek je určen pouze pro dospělé.
4. Při vstávání z postele a uléhání dbejte zvýšené opatrnosti a ujistěte se, že je madlo správně umístěno tak, aby poskytovalo oporu.

## **VÝROBCE**

MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: 160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan, Guangdong, 528513, CHINA.

## **DOVOZ DO AUSTRÁLIE**

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

## **DOVOZ DO USA**

Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

## **ZÁSTUPCE PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (UK REP)**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

## **ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE PRO EU (EC REP)**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Německo

Model: LQX-110051 | Registrační číslo FDA: 3016734231

Tento český návod je překladem původního návodu výrobce.