

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cenově dostupné. Spolehlivé. Vylepšení domácnosti.

BEZPEČNOSTNÍ MADLO K LŮŽKU

Model: LQX-110055



Překlad a české znění návodu k použití

1. Úvod

Toto je originální návod k použití. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.

Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad tohoto návodu. Vzhled výrobku se může lišit podle skutečně dodaného výrobku. V případě technologických nebo softwarových aktualizací výrobku nemusí být uživatel o těchto změnách znovu informován.

Bezpečnostní upozornění

Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte celý návod. Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění.



2. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k použití.

VAROVÁNÍ

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit vážné zranění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ A ÚMRTÍ V DŮSLEDKU PŘEVŘÁCENÍ:

1. NESMÍTE SI NA TENTO VÝROBEK SEDAT ANI NA NĚJ STOUPAT.
2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo se pohybovaly v jeho blízkosti. Malé náhradní díly uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
4. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Nepoužívejte jej, pokud jsou některé části uvolněné nebo poškozené.
5. Chraňte výrobek před ostrými hroty, čepelemi a dalšími předměty, které by mohly jeho povrch poškrábat.

Technické parametry	
Model	Maximální nosnost
LQX-110055	300 lb (cca 136 kg)
Registrační číslo FDA: 3016734231	

Návod k použití

3. Určené použití bezpečnostního madla k lůžku

Toto bezpečnostní madlo k lůžku je pomůcka pro podporu rovnováhy. Je určeno pro osoby, které jsou pohyblivé, ale potřebují určitou pomoc při vstávání z lůžka, uléhání nebo při bezpečné změně polohy na lůžku.

Madlo NENÍ určeno pro osoby s velmi omezenou pohyblivostí ani pro osoby trvale upoutané na lůžko. NENÍ navrženo jako ochrana proti vypadnutí z lůžka.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je. Jejich nedodržení může vést ke zranění.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny části bezpečně smontované a že jsou všechny pružinové kolíky správně zajištěny.
3. Prostor mezi pomocným madlem k lůžku a matrací představuje riziko vážného, život ohrožujícího zachycení. Hlava, krk, paže, nohy nebo tělo osoby se mohou zaklínit mezi boční stranou matrace a částí madla.
4. Matrace musí být po celou dobu těsně přitlačena k pomocnému madlu, bez jakékoli mezery. Toto je nutné často kontrolovat, nejméně jednou denně.
5. Matrace musí být po celou dobu těsně přitlačena k pomocnému madlu, bez jakékoli mezery. Toto je nutné často kontrolovat, nejméně jednou denně.
6. Madlo NIKDY nepoužívejte, pokud není těsně u matrace bez mezer a není vzdáleno nejméně 12,5 palce (31,8 cm) od čela i nožní části lůžka.
7. NIKDY nepoužívejte s dětmi.
8. NIKDY nepoužívejte na dětských postelích pro malé děti, patrových postelích, vodních nebo nafukovacích postelích, postelích s měkkými stlačitelnými podložkami ani na polohovatelných lůžkách. Nepoužívejte také na lůžkách s výškou matrace větší než 13 palců (33 cm) nebo menší než 7 palců (17,8 cm). Používejte POUZE s lůžky velikosti twin, queen a king.
9. Výrobek je pomocná pomůcka. Pacienti, kteří nejsou schopni samostatného pohybu, musí být pod dohledem.

4. Použití, konstrukce a vlastnosti

Použití: Výrobek je určen pro seniory a osoby s poraněním nohou. Poskytuje potřebnou oporu a stabilitu pro bezpečný a klidný spánek.

Konstrukce: Výrobek se skládá především z trubky madla, spodní trubky madla, svařovaného dílu vyztužené trubky, ohýbaného svařovaného dílu základního rámu a svařovaného dílu základního rámu.

Vlastnosti: Tvarově řešené madlo k lůžku ve tvaru písmene T je vyrobeno z vysokopevnostní ocelové trubky s bílým práškovým lakem. Výšku madla a spodní trubky lze nastavit. Madlo má 4 výškové polohy a spodní trubka má 16 výškových poloh. Nastavení a používání je jednoduché.

Specifikace:

1. Povrch má být čistý a hladký, barva jednotná, bez zjevných škrábanců, prasklin, ostrých hran a otřepů.

2. Rozsah nastavení výšky madla: 390–465 mm.

Rozsah nastavení výšky spodní trubky: 330–517 mm.

5. Obsah balení

Otevřete obal a zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny části podle obrázku.



① Trubka nohy (koncovka nebo přísavná koncovka)

② Trubka madla

③ Spojovací plochá trubka

④ Spojovací trubka nohy - levá

⑤ Spojovací trubka nohy - pravá

⑥ Ohnutá trubka základního rámu

⑦ Úložná taška


⑧ Popruhy

⑨ Sáček OPP

Příslušenství: sáček OPP × 1; samořezné šrouby × 4; šrouby × 2; šestihranný klíč × 1.

6. Montáž

1. Vyjměte levou a pravou spojovací trubku nohy a spojovací plochou trubku. Spojte je a utáhněte pomocí šestihranných šroubů podle obrázku 1.

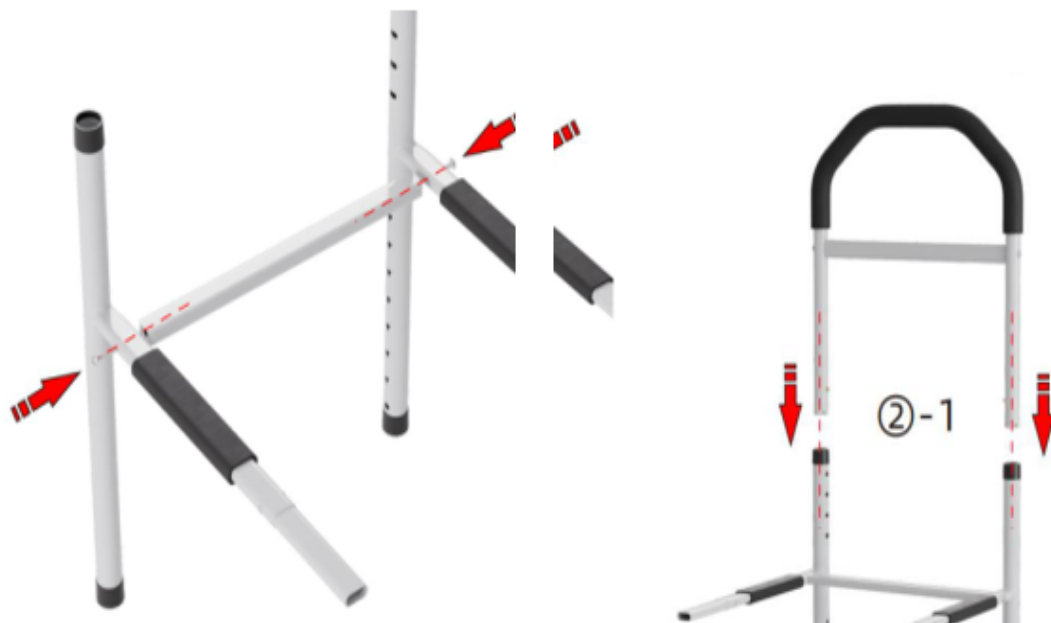

Obrázek 1 – Spojení levé a pravé části základny.


2. Po zasunutí trubky madla do spojovací trubky madla vyskočí zajišťovací kolík, což signalizuje bezpečné upevnění.
3. Po zasunutí trubky nohy do spojovací trubky nohy vyskočí zajišťovací kolík, což signalizuje bezpečné upevnění.
4. Po zasunutí spojovací trubky nohy do svařovaného dílu spojovací trubky nohy vyskočí zajišťovací kolík, což signalizuje bezpečné upevnění.

Obrázek 2 – Zajištění jednotlivých trubek pomocí kolíků (②-1 a ②-2).

7. Úložná taška a nastavení výšky

5. Nainstalujte úložnou tašku.

Nastavení výšky: Nastavte polohu zajišťovacích kolíků a nastavte madlo do požadované výšky podle obrázku.

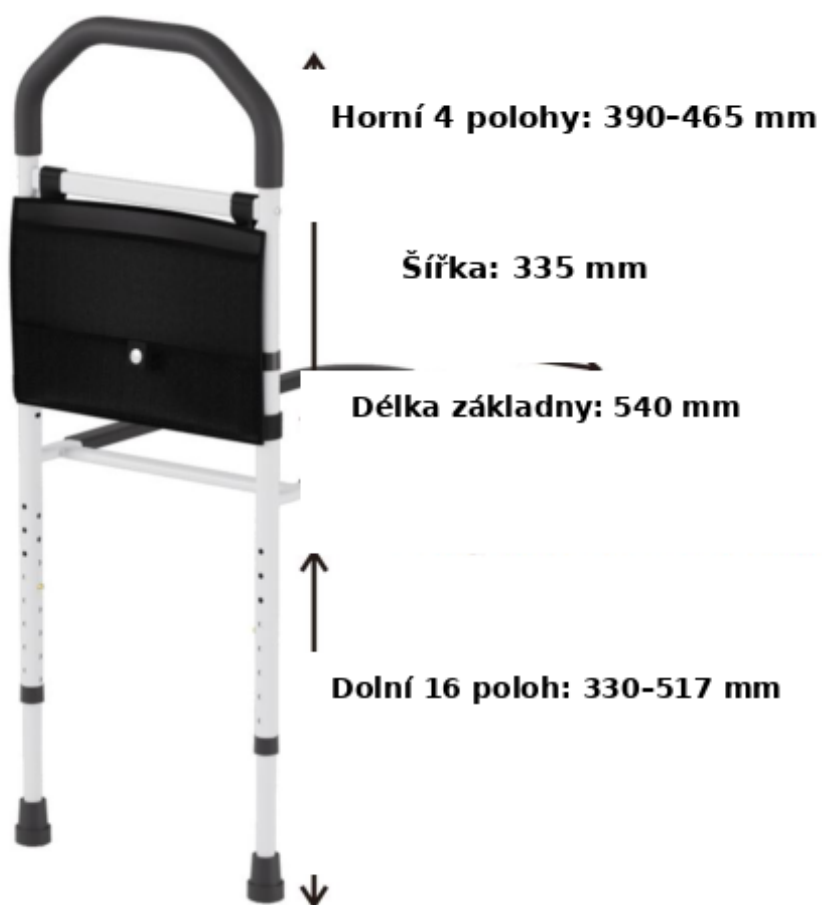

Rozměry a rozsahy nastavení uvedené na obrázku jsou převzaty z originálního návodu. Originál současně uvádí celkovou výšku 732-992 mm; jednotlivé rozsahy jsou 390-465 mm a 330-517 mm.

8. Skladování, upevnění a čištění

Skladování: Výrobek nesmí být vodorovně stlačován. Zacházejte s ním opatrně.

Likvidace: Likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Volitelné upevnění madla k rámu lůžka: Bezpečnostní madlo lze pomocí dodaných šroubů upevnit k základně/rámu lůžka a zvýšit tak stabilitu pro uživatele. Toto upevnění není povinné.

ČIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MADLA K LŮŽKU

Před použitím zkontrolujte vhodnost čisticích prostředků. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani abrazivní utěrky, protože mohou trvale poškodit povrch a zneplatnit záruku.

1. Pravidelně čistěte mýdlovou nebo teplou vodou. Poté výrobek otřete suchým ručníkem.
2. Před použitím nebo uložením nechte výrobek zcela vyschnout.

POPRODEJNÍ SERVIS

1. Pokud zjistíte poškození výrobku nebo chybějící části, kontaktujte zákaznický servis.
2. Zákaznický servis je k dispozici pro dotazy a připomínky týkající se výrobku.
3. Výrobce uvádí, že usiluje o rychlou a efektivní podporu zákazníků.
4. V případě dotazů, uplatnění záruky nebo potřeby pomoci kontaktujte zákaznický servis.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MADLA K LŮŽKU

1. Před použitím se ujistěte, že je madlo správně nainstalováno a bezpečně připevněno k rámu lůžka.
2. Při nastavování výšky nebo polohy madla se před použitím ujistěte, že je bezpečně zajištěno.
3. Nedovolte dětem, aby si na madle hrály nebo se na něj zavěšovaly. Výrobek je určen pouze pro dospělé.
4. Při vstávání z lůžka a uléhání postupujte opatrně a ujistěte se, že je madlo správně umístěno a poskytuje potřebnou oporu.

9. Výrobce a zástupci

Výrobce: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: 160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan, Guangdong, 528513, CHINA.

Dovozce do Austrálie: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia.

Dovozce do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

UK REP - zástupce pro Spojené království:

YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, Spojené království.

EC REP - zástupce pro Evropské společenství:

E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main, Německo.

Model výrobku: LQX-110055

Maximální nosnost: 300 lb (cca 136 kg)

Registrační číslo FDA: 3016734231

Konec českého překladu návodu