

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O VÝROBKU

SKU

ACT-022

Identifikace výrobku

Název výrobku: Lavička do vany s nastavitelnou šířkou

Model: CM 2013

Druh: Lavička do vany

Stav: Nové

Účel použití

Lavička do vany slouží k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu koupání osob se sníženou pohyblivostí. Usnadňuje vstup do vany, výstup z vany a poskytuje stabilní oporu během hygieny. Výrobek je vhodný zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Bezpečnostní upozornění

Před každým použitím zkontrolujte stabilitu lavičky.

Nepřekračujte nosnost 150 kg.

Lavička musí být umístěna symetricky vůči okrajům vany.

Před použitím ověřte upevnění všech prvků.

Nepoužívejte poškozený výrobek.

Výrobek není určen jako stupínek ani opora pro stání.

Děti pouze pod dohledem dospělé osoby.

Montáž

1. Povolte křídlové šrouby.
2. Vyjměte blokovací klipy.
3. Nastavte šířku.
4. Zajistěte klipy.
5. Dotáhněte šrouby.
6. Umístěte lavičku symetricky na vanu.
7. Zkontrolujte stabilitu.

Údržba a skladování

Čistěte měkkým hadříkem a běžnými neabrazivními prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní chemikálie. Skladujte v suchém prostředí.

Technické údaje

Model: CM 2013

Nosnost: 150 kg

Nastavitelná šířka: 72–82 cm

Hloubka: 52–62 cm

Šířka sedáku: 40,5 cm

Délka sedáku: 20,5 cm

Průměr trubky: 2,2 cm

Materiál: Hliník

Označení: CE
Země původu: Polsko

Výrobce

Medreha Sp. z o.o.
Stara Wieś 473B
36-200 Brzozów, Polsko
Tel.: +48 698 998 444
Web: www.sklep.medreha.pl

Odpovědná osoba v EU

Medreha Sp. z o.o.
Stara Wieś 473B
36-200 Brzozów
Polsko

Prodejce v České republice

Actimed
IČO: 70184283
E-mail: info@actimed.cz
Web: www.actimed.cz

Důležité informace

Tento dokument slouží jako český návod k použití a základní informace o výrobku podle informací poskytnutých výrobcem a distributorem. Uschovejte tento návod pro budoucí použití.