

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O VÝROBKU

SKU: ACT-026

Identifikace výrobku

Název výrobku: Nastavitelná sprchová stolička

Druh výrobku: Sprchová stolička

Zdravotnický prostředek: Třída I

Označení: CE

Model: CM 2015

Určené použití

Sprchová stolička je určena k usnadnění osobní hygieny při sprchování. Poskytuje stabilní oporu při sezení a přispívá ke zvýšení bezpečnosti osob se sníženou pohyblivostí, seniorů i osob v rekonvalescenci. Je určena pro použití ve sprše i ve vaně s dostatečným prostorem. Není určena jako schůdek ani pomůcka pro přemísťování osob.

Popis výrobku

Lehká hliníková konstrukce odolná proti korozi, plastový sedák s odtokovými otvory, výškově nastavitelné teleskopické nožičky 39–51 cm a protiskluzové gumové koncovky.

Obsah balení

- 1× sedák
- 4× teleskopická nožička
- Protiskluzové gumové koncovky

Montáž

1. Zkontrolujte obsah balení.
2. Připevněte nožičky.
3. Nastavte výšku.
4. Zkontrolujte zajištění.
5. Postavte na rovný povrch.
6. Ověřte stabilitu.

Použití

Používejte pouze na pevném a rovném podkladu. Před každým použitím zkontrolujte stabilitu. Nepřekračujte nosnost. Po použití opláchněte a osušte.

Bezpečnostní upozornění

Maximální nosnost 120 kg. Nepoužívejte poškozený výrobek. Pravidelně kontrolujte dotažení spojů. Nepoužívejte jako schůdek. Nepoužívejte bez protiskluzových koncovek. Výrobek není určen dětem bez dozoru.

Údržba a skladování

Čistěte měkkým hadříkem a běžnými neabrazivními prostředky. Nepoužívejte agresivní chemikálie. Skladujte na suchém místě.

Technické údaje

Materiál: hliník + PP plast
Barva: bílá
Nosnost: 120 kg
Hmotnost: 1,5 kg
Výška: 39-51 cm
Šířka: 51 cm
Hloubka: 42 cm
Průměr trubek: 2,8 cm
Vnější rozteč: 46 × 42 cm
Vnitřní rozteč: 37 × 31 cm

Výrobce

Tynor Orthotics Private Limited
Hadbast No. 247, Village Kheri Gurna
Rajpura, Punjab, Indie
E-mail: japneet.singh@tynorindia.com
Tel.: +91 172 528 8152

Odpovědná osoba v EU

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert, Německo
E-mail: info@mt-procons.com

Prodejce v České republice

Actimed
IČO: 70184283
Průchodní 96/3, 680 01 Boskovice
E-mail: info@actimed.cz
Web: www.actimed.cz

Informace o zdravotnickém prostředku

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy I splňujícím požadavky evropské legislativy. Je opatřen označením CE.

Likvidace

Po skončení životnosti výrobek zlikvidujte podle místních předpisů.