

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O VÝROBKU

ACT-045 – Zvyšovací sedák

Určení: Sedák usnadňuje vstávání ze židle zvýšením sedu o 10 cm. Je vhodný pro seniory, osoby po TEP kyčle a osoby se sníženou pohyblivostí.

Technické údaje:

Rozměry 40×40 cm, výška 10 cm, materiál PUR pěna, snímatelný bavlněný potah, nosnost 100 kg.

Použití:

Umístěte na pevnou a stabilní židli. Před použitím zkontrolujte správné usazení. Nepřekračujte nosnost 100 kg.

Údržba:

Snímatelný potah perte dle pokynů výrobce. Pěnové jádro neponořujte do vody, čistěte vlhkým hadříkem.

Výrobce:

SANITRON s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, Česká republika
E-mail: info@sanitron.one

Distributor: Actimed.cz