

ACT-051 – Besco Francouzská berle, modrá (BES-WA05)

Určení výrobku

Francouzská berle je určena k podpoře chůze a odlehčení dolních končetin u osob se sníženou pohyblivostí, po úrazech, operacích nebo při rehabilitaci.

Technické údaje

Model: BES-WA05

Barva: Modrá

Výška od držadla k zemi: 80–122 cm

Vzdálenost od držadla k opěrce předloktí: 23 cm

Hmotnost: 0,54 kg

Nosnost: 100 kg

Materiál: duralová trubka, plastové držadlo a opěrka předloktí, gumová protiskluzová koncovka.

Nastavení

Uvolněte aretační pojistku, nastavte požadovanou výšku a zkontrolujte správné zajištění kolíku.

Bezpečnost

Nepřekračujte nosnost 100 kg. Před každým použitím zkontrolujte stav berle a gumové koncovky. Nepoužívejte poškozený výrobek. Na kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti.

Údržba

Čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.

Výrobce

BESCO MEDICAL LIMITED, Čína

Odpovědná osoba v EU

SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA Capelle aan den IJssel, Nizozemsko

EAN: 6975196416024

Kategorie: Kompenzační pomůcky

Zařazení: Zdravotnický prostředek dle MDR (EU) 2017/745.