




NÁVOD K POUŽITÍ

PODPĚRA NA WC PŘENOSNÁ

4321 EX



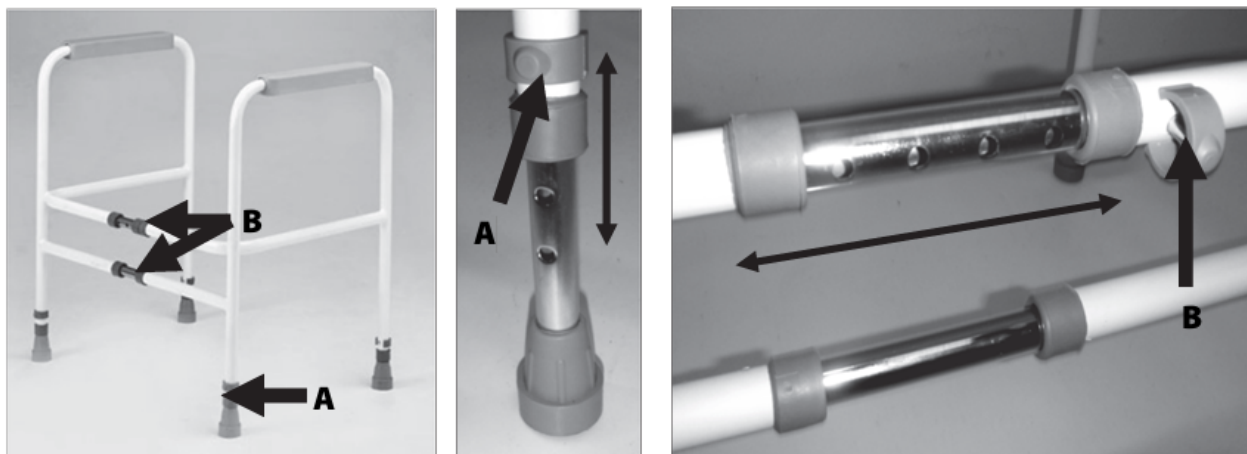

POUŽITÍ

Podpěra na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Uspadňuje osobní hygienu, snižuje riziko pádu a zvyšuje soběstačnost uživatele.

POPIS

Šířkově i výškově nastavitelný ocelový rám je doplněn vyměkčenými područkami. Výškově nastavitelné nohy jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte návod. Vhodnost používání konzultujte s lékařem. Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů.

NASTAVENÍ

Pro nastavení výšky vytáhněte pojistku A, nastavte výšku a pojistku vraťte zpět. U všech čtyř nohou postup opakujte. Pro nastavení šířky vytáhněte pojistky B, nastavte šířku a pojistky zasuněte zpět.

ÚDRŽBA

Čistěte běžnými prostředky bez rozpouštědel. Pravidelně kontrolujte aretační prvky a pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě závady kontaktujte svého prodejce.