

NÁVOD K POUŽITÍ

Koupelnový schůdek CM 2016 (2 v 1)

Určení výrobku

Koupelnový schůdek CM 2016 je určen k bezpečnějšímu vstupu do vany, sprchového prostoru a k usnadnění každodenní hygieny. Je vhodný zejména pro seniory, osoby se sníženou pohyblivostí, osoby po operacích a během rehabilitace.

Technické parametry

Model: CM 2016

Maximální nosnost: 120 kg

Nastavitelná výška: 205–260 mm

Délka sedací plochy: 41 cm

Šířka sedací plochy: 22 cm

Hmotnost výrobku: 1,3 kg

Materiál konstrukce: hliník a plastové komponenty

Bezpečnostní upozornění

- Před prvním použitím si přečtěte celý návod.
- Nepřekračujte maximální nosnost 120 kg.
- Před každým použitím zkontrolujte stabilitu výrobku.
- Používejte pouze na rovném a pevném povrchu.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Výrobek není určen jako hračka.

Nastavení výšky

1. Stiskněte pojistné tlačítko na noze výrobku.
2. Nastavte požadovanou výšku.
3. Ujistěte se, že pojistka správně zapadla do otvoru.
4. Stejným způsobem nastavte všechny nohy na stejnou výšku.
5. Před použitím zkontrolujte stabilitu.

Použití jako schůdek do vany

1. Umístěte schůdek před vanu.
2. Ověřte, že všechny nožičky pevně dosedají na podlahu.
3. Opatrně vystupte na schůdek.
4. Přeneste jednu nohu přes okraj vany a následně druhou.
5. Při pohybu používejte vhodnou oporu.

Čištění a údržba

Výrobek pravidelně kontrolujte a čistěte měkkým hadříkem a teplou vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky. Pravidelně kontrolujte stav gumových protiskluzových koncovek.

Záruka a skladování

Výrobek skladujte v suchém prostředí mimo přímé sluneční záření. Poškozené části neprodleně vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly.

Důležité upozornění

Zdravotnický prostředek. Používejte podle návodu k použití. Pokud si nejste jisti vhodností produktu pro svůj zdravotní stav, poraďte se s lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem.