

NÁVOD K POUŽITÍ

Nástavec na WC 15 cm s víkem

Určení výrobku

Nástavec na WC je určen pro zvýšení výšky sedu toalety o 15 cm. Usnadňuje usedání a vstávání, zejména seniorům, osobám po operacích kyčlí, kolen nebo páteře a osobám se sníženou pohyblivostí.

Obsah balení

- Nástavec na WC s víkem
- Upevňovací mechanismus
- Návod k použití

Montáž

1. Umístěte nástavec na toaletu.
2. Nastavte upevňovací prvky tak, aby nástavec pevně dosedal na mísu.
3. Dotáhněte upevňovací šrouby.
4. Před použitím zkontrolujte stabilitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím zkontrolujte správné upevnění.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Nepřekračujte maximální nosnost 200 kg.
- Vždy dosedějte celou plochou sedáku.
- Výrobek není určen jako schůdek.

Čištění a údržba

Výrobek čistěte měkkým hadříkem a běžnými neagresivními čisticími prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla ani bělidla.

Technické parametry

Výška nástavce: 15 cm

Materiál: Polypropylen (PP)

Barva: bílá

Maximální nosnost: 200 kg

Víko: ano

Důležité upozornění

Zdravotnický prostředek používejte pouze v souladu s tímto návodem. V případě poškození výrobek dále nepoužívejte.