

NÁVOD K POUŽITÍ

NASTAVITELNÁ STOLIČKA

549 B



POUŽITÍ

Stolička tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní sedací zařízení v bytě. Svoji konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobních aktivit při práci, hygieně atd. Zároveň eliminuje možné riziko pádu a výrazným způsobem usnadňuje sed a vstávání po totální endoprotéze kyčle a problémech s nosnými klouby.

POPIS

Ocelový rám stoličky je doplněn změkčenou sedačkou, madly a opěrkou zad. Nohy jsou pomocí pojistek výškově nastavitelné a na jejich konci jsou protiskluzové pryžové nástavce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním stoličky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte stoličku k sezení.

Stoličku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost.

Při nastavování výšky stoličky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při užívání stoličky musí být všechny nohy v kontaktu s podkladem.

Stolička není určena pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ STOLIČKY

Pro nastavení stoličky vyjměte aretační „E“ pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Ve zvolené poloze pojistku zasuněte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.



ÚDRŽBA

Stoličku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.